

Инструкция BioleVox **HA**

Biolevox («Биолевокс») HA — препарат для внутрисуставных инъекций. Процедуру должен проводить только квалифицированный медицинский персонал, обученный методике инъекционного введения средств замещения синовиальной жидкости, и только в стерильных условиях в медицинском учреждении. Тазобедренный сустав труднодоступен для инъекции, поэтому препарат вводят под контролем УЗИ.

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!**

Рекомендации после инъекции:

- 1 После внутрисуставной инъекции **на 48 часов** воздержитесь от поднятия тяжестей и физических нагрузок.
- 2 После внутрисуставной инъекции могут быть кратковременные местные реакции, например, чувствительность, боль, покраснение и отек в области сустава, куда вводили препарат. Они **проходят самостоятельно** в течение нескольких суток.
- 3 Если через 72 часа после процедуры дискомфорт (чувствительность, боль, покраснение и отек в области сустава) не прошел, усилился или появились новые симптомы, **СРОЧНО** обратитесь к тому врачу, который проводил процедуру.
- 4 После внутрисуставной инъекции **можно** управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

ЧТО МОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ СОСТОЯНИЕ?

Охлаждение области инъекции в течение 5-10 минут. Используйте охлаждающие мешочки (гипотермические пакеты) из аптеки.

Одновременный прием **анальгетиков и противовоспалительных препаратов (НПВП).**

Больше информации о BioleVox **HA**

	Biolevox HA MINI 1.6%	Biolevox HA 2.2%	Biolevox HA ONE 2.5%
Показания	Боль и снижение подвижности суставов, связанные с дегенеративно-дистрофическими поражениями суставов, включая остеоартрит и остеоартроз; боль и снижение подвижности суставов, связанные с травмами; восстановление после спортивных травм; повышенные нагрузки на поврежденные суставы.		
В какие суставы вводят	Вводят в любые суставы. За счет меньшей концентрации ГК препарат мягко воздействует на крупные и средние суставы, например, при слабо выраженном артрозе или после артроскопии. Удобен для точечного введения в мелкие суставы: фасеточные суставы; плюснефаланговые суставы; запястно-пястные суставы; височно-нижнечелюстные суставы; межфаланговые суставы.	Вводят в средние и большие суставы: локтевой сустав; коленный сустав; плечевой сустав; голеностопный сустав; тазобедренный сустав.	Вводят в большие суставы, в основном в коленный сустав.
Схема применения	Курс состоит из 1-3 внутрисуставных инъекций, которые вводят с интервалом в неделю.	Курс состоит из 3 внутрисуставных инъекций, которые вводят с интервалом в неделю.	Курс состоит из 1 внутрисуставной инъекции.
Продолжительность действия препарата	Эффект от лечения любым вариантом Biolevox HA сохраняется не менее 6 месяцев. При необходимости курс инъекций можно повторить.		
Противопоказания	Гиперчувствительность к компонентам импланта Септический артрит Дерматоз в месте инъекций	Использование антикоагулянтов Возраст младше 18 лет (отсутствуют клинические данные) Беременность и период лактации (отсутствуют клинические данные)	
Состав наборов	Шприц с гелем — 1 шт. x 1,0 мл. Игла 21G — 1 шт. Инструкция по применению — 1 шт.	Шприц с гелем — 1 шт. x 2,0 мл. Игла 21G — 1 шт. Инструкция по применению — 1 шт.	Шприц с гелем — 1 шт. x 4.8 мл. Игла 19G — 1 шт. Инструкция по применению — 1 шт.
	В каждом наборе шприц с препаратом для однократного использования. Каждый шприц содержит объем, рекомендуемый для однократного введения.		